

CareStart™



DOA-6 test

(COC, KET, MOP, MDMA, MET, THC)

마약류 6종 신속진단키트




- ✓ 사람의 소변에서 마약류 성분을 면역크로마토그래피법으로 정성 검사하여 약물의 존재 여부 및 대사산물 확인
- ✓ 10분 이내로 결과 확인이 가능한 신속 검사
- ✓ 마약류 6종 동시 검사
 - 코카인 (Cocaine, COC)
 - 케타민 (Ketamine, KET)
 - 메틸렌디옥시메스암페타민 (Methylenedioxymethamphetamine, MDMA)
 - 메스암페타민 (Methamphetamine, MET)
 - 모르핀 (Morphine, MOP)
 - 대마초 (Tetrahydrocannabinol, THC)

분석적 성능

약물남용·정신건강서비스국(SAMHSA)의 가이드에 근거하여 설정한 각 검사 항목의 Cut-off 농도는 다음과 같습니다.

검사 항목	COC	KET	MDMA	MET	MOP	THC
Cut-off (ng/mL)	300	1,000	500	1,000	300	50

시험 방법

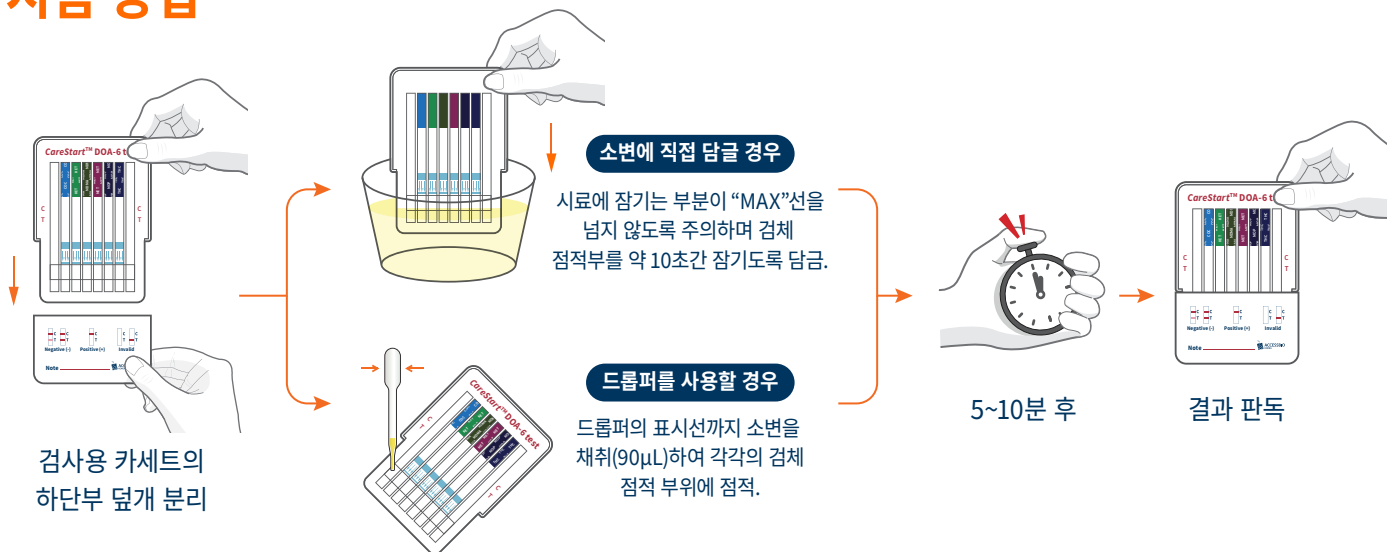


결과 판독

양성 결과



대조선(C)에만 적자색 선이 나타납니다.
(각각의 스트립 모두 동일합니다.)

음성 결과

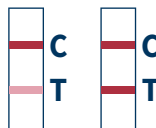

대조선(C) 및 검사선(T)에 적자색 선이 모두 나타납니다.
(각각의 스트립 모두 동일합니다.)

무효



대조선(C)이 나타나지 않습니다.
(절차를 검토하고 새로운 검사 카세트를 사용하여 다시 검사하십시오.)

주문 정보

제조사에 문의해주시요.

