


Accurate Results

사용 방법(One-step test protocol)


1.

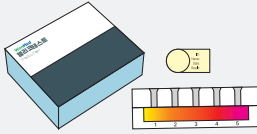

냉장 보관(2 ~ 8°C)한 WonMed 헬리코테스트(HelicoTest)를 상온에 30분 정도 방치하여 준비합니다.




2.

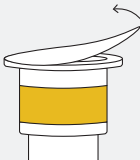

시약 용기 상단의 스티커를 제거합니다.




3.

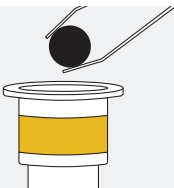

검체를 시약 용기에 투입합니다.




4.

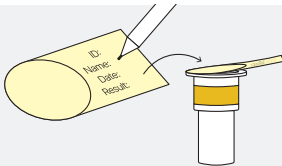

제공된 라벨 스티커에 ID 번호, 성명, 날짜 등을 기재합니다.
라벨스티커를 용기 상단에 부착합니다.




5.

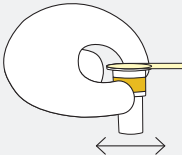


용기를 저강도로 3회 흔든 후 반응 대조표 랙에 올려 놓습니다.

결과 판정

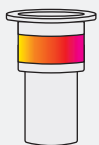

양성 판정

검체 투입 10분 이후부터 시약의 색이 붉은색 계열(열은 주황색, 주황색, 붉은색 또는 적자색)로 발색이 될 경우 양성으로 판정합니다.

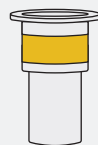

음성 판정

시약의 색이 반응시간 2시간 이후에도 변화가 없고, 노란색을 유지할 경우 음성으로 판정합니다. 2시간 이후는 판독하지 않습니다.

